

Pro medix

Becht XL Wipes plus

REF 530.90L | Desinfektion und Reinigung | 90 None | Beutel[zum Produkt](#)

Becht XL Wipes plus

REF 530.90L | Desinfektion und Reinigung
90 None | Beutel

Beschreibung

Vorgetränkte Desinfektionstücher Vorgetränkte Tücher für die Wischdesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten, z.B. Behandlungsstühle, Schwebetische, Handstücke etc. zwischen dem Patientenwechsel.

Classification

Medizinprodukt, Klasse IIa, Regel 15 | CE Certificate: CE0197

1/3



Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
77656 Offenburg, Germany

www.alfredbecht.de
Tel.: +49 781 605 86-0
Fax.: +49 781 605 86-40



Pro medix

Becht XL Wipes plus

REF 530.90L | Desinfektion und Reinigung | 90 None | Beutel[zum Produkt](#)**Anwendung**

Beutel in ein ausreichend großes Behältnis stellen (z.B. Becht-Spenderbox. REF 530). Unterhalb der Schweißlinie abschneiden. Mit dem ersten Tuch den Deckel und die Abreißvorrichtung desinfizieren. Danach das Tuch aus der Mitte der Rolle durch die Deckelöffnung ziehen. Zur Desinfektion die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände vollflächig einreiben und die Flüssigkeit einwirken lassen. Einwirkzeiten beachten. Nicht nachwischen. Spenderbox nach Entnahme eines Tuches immer sofort verschließen.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: ▪ 250 mg Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-Chlorid ▪ 250 mg Didecyldimethylammonium-Chlorid ▪ 250 mg C12-14 Alkyl[(ethylphenyl) methyl]dimethyl Chlorid ▪ 20 g Ethanol ▪ 9,95 g 1-Propanol

Wirkung

- Wirkt bakterizid (einschl. MRSA) und levurozid (EN 13727 / 13624) in 1 Minute.
- erfolgreich getestet im 4-Felder-Test nach EN 16615
- wirkt begrenzt viruzid (HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia) in 1 Minute (EN 14476)
- wirkt tuberkulozid (M.terrae) in 5 Minuten (EN 14348)

Eigenschaften

- Tuchgröße und Grammat: 28 x 30 cm; 50 g/qm
- Besonders weiches, saugfähiges und reißfestes Vliestuch
- erfolgreich im Röhmtest auf Plexiglas
- hohes Wiederabgabevermögen der Flüssigkeit auf die zu desinfizierende Fläche
- angenehm duftend

Gefahrenhinweise

- Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- Verursacht schwere Augenschäden
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Classification

Medizinprodukt, Klasse IIa, Regel 15 | CE Certificate: CE0197

2/3



Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
77656 Offenburg, Germany

www.alfredbecht.de
Tel.: +49 781 605 86-0
Fax.: +49 781 605 86-40



Pro medix

Becht XL Wipes plus

REF 530.90L | Desinfektion und Reinigung | 90 None | Beutel

[zum Produkt](#)

Classification

Medizinprodukt, Klasse IIa, Regel 15 | CE Certificate: CE0197

3/3



Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
77656 Offenburg, Germany

www.alfredbecht.de
Tel.: +49 781 605 86-0
Fax.: +49 781 605 86-40

